



Monsenso Clinic



Indice

1. Guida utente per i pazienti	3
2. Benvenuti a Monsenso Clinic	4
2.1. Benvenuti a Monsenso Clinic	4
2.2. Uso previsto.....	4
2.3. Dichiarazioni normative.....	4
2.4. Informazioni sulla guida per l'utente	4
3. L'applicazione Monsenso per smartphone	6
3.1. Guida utente per i medici	8
3.2. Autovalutazione	9
3.2.1. Parametri primari	9
3.2.2. Parametri secondari.....	9
3.2.3. Parametri personali.....	9
3.2.4. Dati del sensore.....	9
3.2.4.1. Attività fisica	9
3.2.4.2. Attività sociale	10
3.2.4.3. Mobilità	10
3.2.5. Come effettuare l'autovalutazione.....	10
3.2.5.1. Se è stata dimenticata un'autovalutazione.....	10
3.2.6. Configurare l'autovalutazione.....	10
3.2.6.1. Attivazione/disattivazione dei parametri secondari.....	11
3.2.6.2. Attivazione/disattivazione dei segnali di allerta	11
3.2.6.3. Aggiungere un parametro personale.....	11
3.3. Visualizzazioni	11
3.4. Segnali di allerta	12
3.4.1. Aggiungere, modificare e cancellare i segnali di allerta.....	13
3.5. Fattori scatenanti	14
3.5.1. Aggiungere, modificare e cancellare i fattori scatenanti	15
3.6. Piani di azione	16
3.7. Farmaci.....	17
3.7.1. Aggiungere, modificare e cancellare un farmaco.....	18
3.8. Questionari	19
3.9. Benvenuti a Monsenso Clinic	20
3.10. Impostazioni.....	20
3.10.1. Promemoria	21
3.10.2. Codice PIN	22
3.10.3. Sincronizzare il dispositivo.....	23
3.11. Utilizzo del telefono.....	23
4. Guida utente per i medici	24

4.1. Panoramica dettagliata del paziente.....	25
4.2. Guida utente per i medici	27
4.2.1. Benvenuti a Monsenso Clinic.....	28
4.2.2. Benvenuti a Monsenso Clinic.....	28
4.2.3. Panoramica dettagliata del paziente	28
4.2.4. Il portale Web per i medici	30
4.2.5. Guida utente per i medici	31
4.2.5.1. Segnali di allerta.....	32
4.2.5.2. Configure self-assessment notifications.....	32
4.3. Il portale Web per i medici.....	32
4.3.1. Panoramica dettagliata del paziente	33
4.3.2. Prepare for and evaluate sessions.....	34
4.4. Piano di trattamento con il farmaco	34
4.4.1. Guida utente per i medici	36
4.5. Explore your data	37
4.6. Psychoeducation.....	37
5. My Monsenso: portale Web.....	38
5.1. Accesso e uscita	38
5.2. Guida utente per i medici	39
5.3. Il portale Web per i medici.....	40
5.4. Panoramica.....	40
5.5. Dettagli	40
5.5.1. Modificare i dettagli.....	41
5.6. Visualizzazioni	41
5.7. Segnali di allerta	42
5.7.1. Aggiungere, modificare e cancellare i segnali di allerta.....	43
5.8. Fattori scatenanti	43
5.8.1. Aggiungere, modificare e cancellare i fattori scatenanti	44
5.9. Piani di azione	45
5.9.1. Aggiungere, modificare e cancellare i piani di azione.....	46
5.10. Farmaci.....	47
5.10.1. Aggiungere, modificare e cancellare un farmaco.....	47
5.10.2. Piano di trattamento con il farmaco.....	48
5.10.3. Esperienze con il farmaco.....	48
5.11. Guida utente per i medici	49
5.12. Benvenuti a Monsenso Clinic	50
5.13. Il portale Web per i medici.....	50
5.13.1. Guida utente per i medici	51
5.14. Amministrazione.....	52
5.14.1. Pazienti	52
5.14.2. Medici.....	54

5.14.3. Modelli dei piani di azione.....	56
5.14.3.1. Aggiungere, modificare e cancellare i modelli dei piani di azione.....	56
5.15. Valutazione del medico	57
6. Sicurezza.....	58
7. Contatti	59

1. Guida utente per i pazienti



Guida utente per i pazienti

Guida utente v. 1.34
Software v. 1.26.1
4/2019

2. Benvenuti a Monsenso Clinic

Come utente di Monsenso Clinic, si assume un ruolo importante e attivo nel proprio trattamento. Ogni giorno si valuteranno i propri progressi completando un'autovalutazione sullo smartphone, che coprirà aspetti importanti e approfonditi del trattamento che si desidera esaminare insieme al proprio medico. La soluzione Monsenso mira a fornire le informazioni e il supporto di cui si ha bisogno, in base ai propri desideri, sfide ed esigenze.

2.1. Benvenuti a Monsenso Clinic

Come utente di Monsenso Clinic, si riveste un ruolo attivo e importante nel trattamento dei propri pazienti. I pazienti riceveranno le autovalutazioni quotidiane sui loro smartphone, in relazione ad aspetti importanti e approfonditi della loro malattia che desiderano esaminare insieme al proprio medico. La soluzione Monsenso fornirà un supporto informativo e collaborativo ai pazienti in base alle loro sfide, esigenze e preferenze.

2.2. Uso previsto

Il sistema Monsenso Clinic è concepito per il monitoraggio automatico del comportamento, dello stato di salute e della conformità ai farmaci dei pazienti, e per la memorizzazione, la visualizzazione, la condivisione e l'elaborazione digitale di tali dati. Il sistema può essere utilizzato come strumento di assistenza nel processo decisionale clinico.

2.3. Dichiarazioni normative

Il prodotto, Monsenso Clinic, presenta:

- UE: marcatura CE come dispositivo medico di classe I.
- AUS: approvazione TGA come dispositivo medico di classe 1.

2.4. Informazioni sulla guida per l'utente

Questa guida per l'utente descrive le funzioni e le caratteristiche dell'applicazione telefonica e del sistema del portale Web Monsenso che verranno utilizzati.

Il portale Web è accessibile tramite computer o tablet, come ad esempio un iPad.

L'app per smartphone richiede:


- Sistema operativo iOS 9 o successivo per dispositivi Apple. È compatibile con iPhone e iPod touch.
- Sistema operativo Android versione 5.0 o successiva per i dispositivi Android.

Si consiglia di leggere questa guida prima di utilizzare il sistema, in modo da poter familiarizzare con tutte le caratteristiche di Monsenso Clinic.


Questa guida per l'utente è completa e contiene aspetti di funzionalità non accessibili a tutti gli utenti.

3. L'applicazione Monsenso per smartphone

All'apertura dell'applicazione, viene visualizzato il Dashboard.

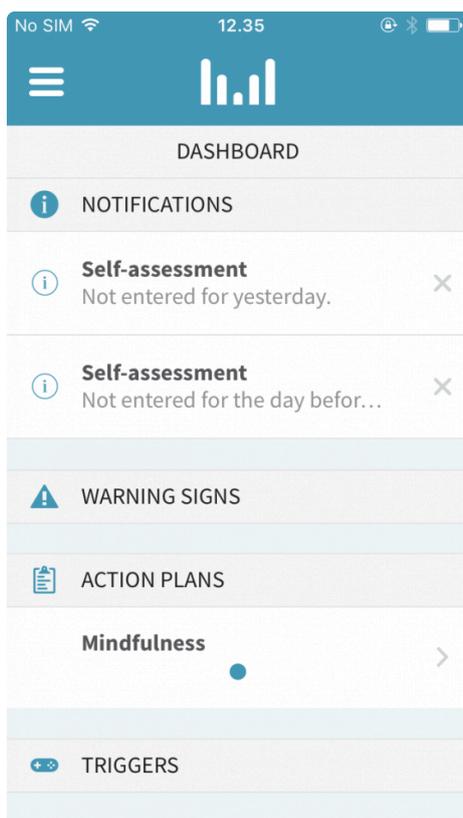

Nell'angolo in alto a sinistra, è visualizzata l'icona del menu . È possibile utilizzare il menu per navigare tra le diverse funzioni dell'app.

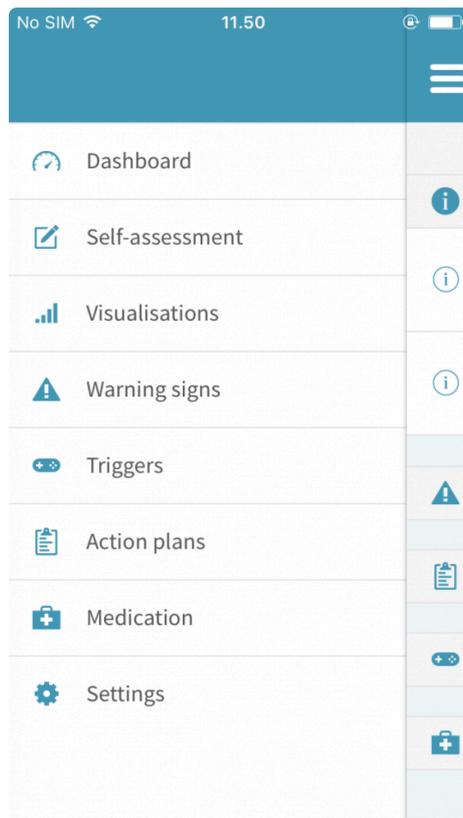

3.1. Guida utente per i medici



3.2. Autovalutazione

L'autovalutazione è la valutazione quotidiana e personale dei propri progressi. L'autovalutazione consiste in tre tipi di parametri di valutazione: parametri primari, secondari e personali.

3.2.1. Parametri primari

I parametri primari sono preinstallati e attivati in modo predefinito. Questi parametri non possono essere rimossi dall'autovalutazione.

3.2.2. Parametri secondari

I parametri secondari, come i parametri primari, sono preinstallati, ma è possibile attivarli e disattivarli per personalizzare l'autovalutazione in base alle proprie esigenze e preferenze.

Per ulteriori informazioni sull'attivazione dei parametri secondari, in modo che vengano visualizzati nell'autovalutazione, consultare la sezione "3.1.6. Configurare l'autovalutazione":#configure-self-assessment.

3.2.3. Parametri personali

Se non si riesce a trovare il parametro che si stava cercando tra i parametri primari o secondari, è possibile aggiungere i propri parametri personalizzati all'autovalutazione.

Per ulteriori informazioni su come personalizzare l'autovalutazione, consultare la sezione "3.1.6. Configurare l'autovalutazione":#configure-self-assessment

3.2.4. Dati del sensore

Oltre all'autovalutazione quotidiana, il sistema raccoglie automaticamente anche i dati dei sensori dallo smartphone, inclusi i dati relativi all'attività fisica, all'attività sociale, alla mobilità e all'uso del telefono. La presente sezione tratterà in dettaglio ciascuna di queste categorie.

Le visualizzazioni aggregate di questi dati sono accessibili solo al paziente e al suo medico.

3.2.4.1. Attività fisica

L'attività fisica viene misurata con l'accelerometro integrato nello smartphone, che genera dati indicativi della misura dello spostamento del telefono.

3.2.4.2. Attività sociale

I dati relativi all'attività sociale sono costituiti dalla durata delle chiamate telefoniche in entrata e in uscita e dal numero di messaggi di testo inviati e ricevuti.

3.2.4.3. Mobilità

I dati geografici sono raccolti da ID di antenna GSM, Wi-Fi, Bluetooth e posizioni GPS per indicare il livello di movimento.

3.2.5. Come effettuare l'autovalutazione

L'autovalutazione deve essere completata ogni giorno. È possibile continuare a modificare i dati inseriti fino a mezzanotte, dopodiché i dati verranno bloccati e finalizzati.

Dopo aver effettuato un'autovalutazione e fatto clic su "Salva", i risultati verranno immediatamente visualizzati in un grafico a linee nella sezione "Visualizzazioni". Per ulteriori informazioni sulle visualizzazioni, consultare la sezione "3.2. Visualizzazioni":#visualisations

Tutte le autovalutazioni sono automaticamente sincronizzate con il portale Web del sistema. Per informazioni su come accedere al portale Web, consultare la sezione "4. My Monsenso: portale web":#my-monsenso-web-portal

3.2.5.1. Se è stata dimenticata un'autovalutazione

È possibile completare un'autovalutazione fino a due giorni dopo.

1. Toccare  nell'angolo in alto a sinistra dello schermo.
2. Selezionare "Autovalutazione".
3. Toccare  nell'angolo in alto a destra.
4. Selezionare "ieri" o "l'altro ieri".
5. Completare l'autovalutazione.
6. Premere "Salva". Una volta terminata l'autovalutazione salvata (dopo mezzanotte), non è possibile tornare indietro per modificare la valutazione.

3.2.6. Configurare l'autovalutazione

La funzione di configurazione consente di personalizzare il modulo di autovalutazione.

È possibile aggiungere tre configurazioni: parametri secondari, segnali di allerta e parametri personali.

Accedere alle configurazioni

1. Toccare  nell'angolo in alto a sinistra dello schermo.
2. Selezionare "Autovalutazione".
3. Toccare  nell'angolo in alto a destra.
4. Selezionare "Configurazione".

Se si disattiva un parametro, non sarà visibile nell'autovalutazione.

3.2.6.1. Attivazione/disattivazione dei parametri secondari

1. Individuare il parametro secondario che si desidera attivare/disattivare.
2. Portare il parametro su blu per **attivarlo**.
3. Portare il parametro su bianco per **disattivarlo**.

3.2.6.2. Attivazione/disattivazione dei segnali di allerta

1. Individuare il segnale di allerta che si desidera attivare/disattivare.
2. Portare il segnale di allerta su blu per **attivarlo**.
3. Portare il segnale di allerta su bianco per **disattivarlo**.

3.2.6.3. Aggiungere un parametro personale

Se il parametro che si desidera aggiungere non esiste come parametro secondario, è possibile aggiungere il proprio parametro personalizzato.

Creare un parametro personale

1. Toccare  a destra di "Parametri personali".
2. Aggiungere un titolo.
3. Aggiungere un tipo di scala per il parametro.
4. Toccare "Salva".
5. Il parametro verrà visualizzato tra i parametri personali.
 - a. Portare il parametro personale su blu per **attivarlo**.
 - b. Portare il parametro personale su bianco per **disattivarlo**.

3.3. Visualizzazioni

Nella sezione "Visualizzazioni" è possibile visualizzare grafici a linee che rappresentano i dati dei

parametri dell'autovalutazione.


Quando si apre la pagina "Visualizzazioni", viene visualizzata automaticamente la categoria "Generale", che mostra i dati dell'autovalutazione per le ultime due settimane.

Aprire diverse visualizzazioni

1. Toccare ▼ a destra di "Categorie".
2. Selezionare la categoria che si desidera visualizzare dal menu a discesa.

Modificare il periodo delle visualizzazioni

1. Individuare le opzioni dell'intervallo di tempo nella parte inferiore dello schermo.
2. Toccare il periodo che si desidera visualizzare.

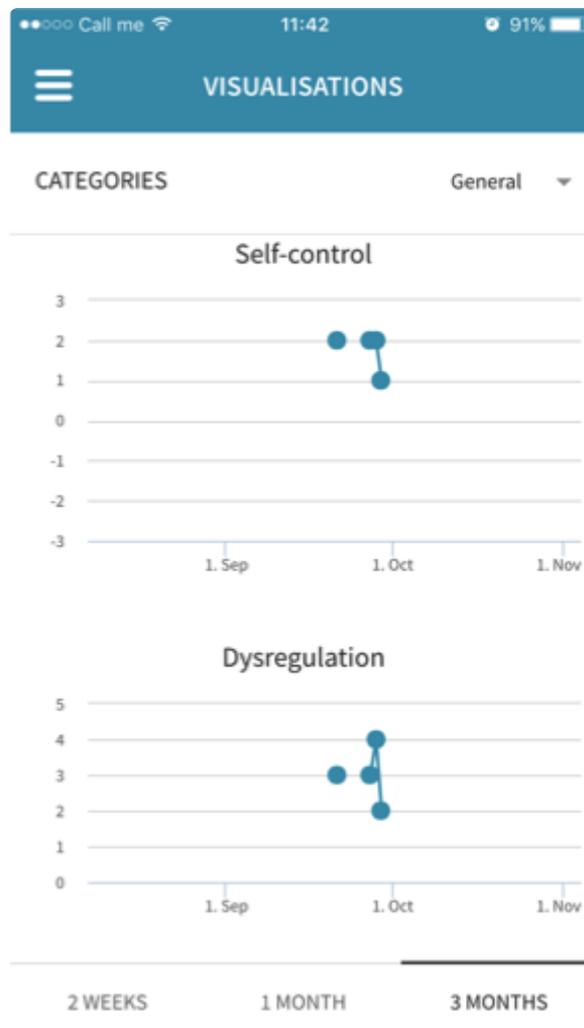

3.4. Segnali di allerta


I segnali di allerta sono segni che possono indicare l'insorgere di eventuali mutamenti nello stato

mentale, che possono essere positivi o negativi.

I segnali di allerta possono essere difficili da autoidentificare, motivo per cui si consiglia di provare a collaborare con il proprio medico e la rete di supporto per identificarli.

Una volta configurati e attivati, i segnali di allerta verranno visualizzati nell'autovalutazione. Consultare la sezione "3.1.6.2. Attivazione/disattivazione dei segnali di allerta":#warning-signs-on-off per istruzioni dettagliate su come procedere.

Quando un segnale di allerta è stato registrato, apparirà una notifica sul dashboard Monsenso e una notifica push sul telefono. Se si preme una di queste due notifiche, verranno visualizzati ulteriori dettagli sul segnale di allerta.

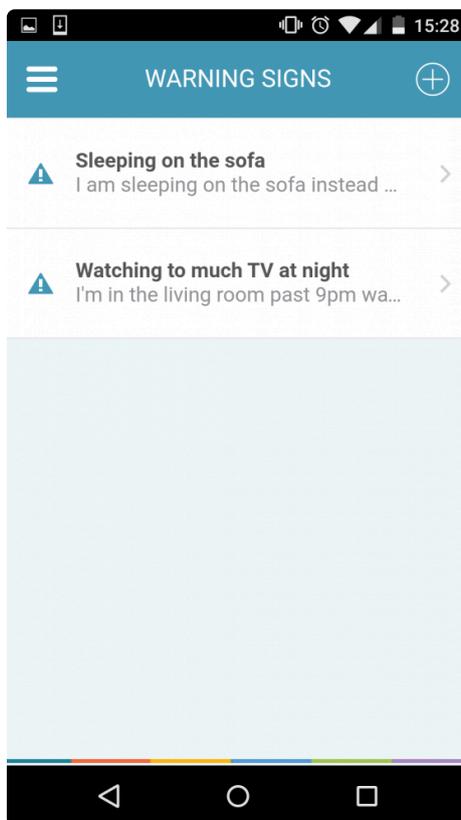

3.4.1. Aggiungere, modificare e cancellare i segnali di allerta

Aggiungere un segnale di allerta


1. Toccare ⊕ nell'angolo in alto a destra.
2. Compilare i campi di inserimento. "Feedback" si riferisce a un testo che è possibile aggiungere quando si presenta questo segnale di allerta.
3. Toccare "Salva".

Modificare un segnale di allerta

1. Individuare e toccare il segnale di allerta che si desidera modificare.
2. Toccare  nell'angolo in alto a destra.
3. Selezionare "Modifica".
4. Compilare il modulo di inserimento.
5. Toccare "Salva".

Cancellare un segnale di allerta

1. Individuare e toccare il segnale di allerta che si desidera cancellare.
2. Toccare  nell'angolo in alto a destra.
3. Selezionare "Cancella".

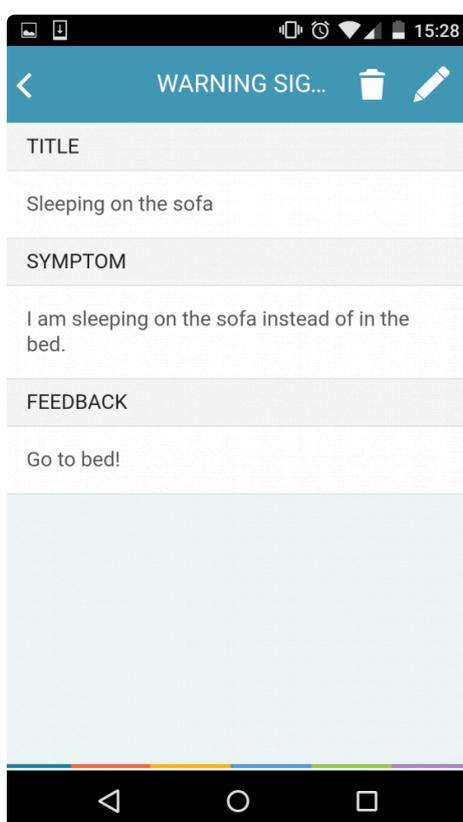


3.5. Fattori scatenanti

I fattori scatenanti sono segni di progressione del mutamento del comportamento che il sistema rileva e di cui avverte il paziente. Il sistema determina la presenza di un fattore scatenante sulla base delle autovalutazioni quotidiane.

Quando si aggiunge un fattore scatenante per il paziente, si comunica al sistema di monitorare e avvisare della comparsa di un parametro per un periodo di tempo prestabilito. Ad esempio, un fattore scatenante potrebbe essere il monitoraggio del sistema per determinare quando "il livello di stress è pari

o superiore a 2 per 5 giorni consecutivi".

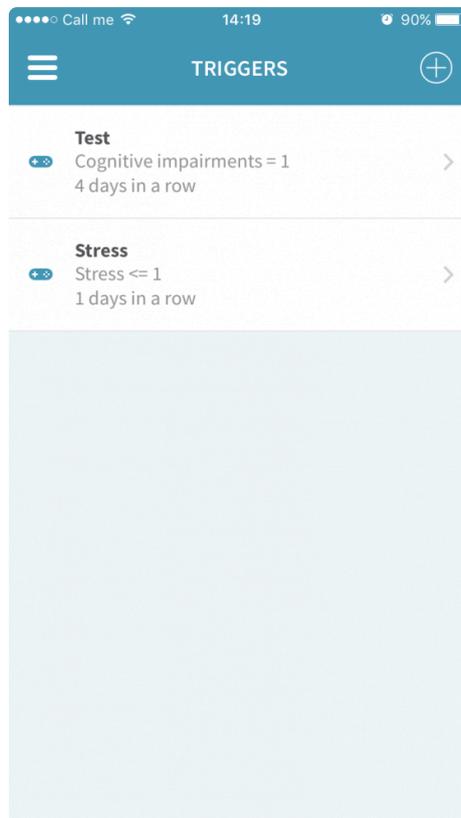

3.5.1. Aggiungere, modificare e cancellare i fattori scatenanti

Aggiungere un fattore scatenante


1. Toccare ⊕ nell'angolo in alto a destra.
2. Compilare i campi di inserimento.
 - a. "Elemento" è il parametro che si sta selezionando come fattore scatenante. Se il parametro non compare nell'elenco, è possibile aggiungerlo come parametro personalizzato; per informazioni su come procedere, consultare la sezione "3.1.6.3. Aggiungere un parametro personale":#adding-a-personal-parameter
 - b. "Misura" è l'operatore utilizzato per specificare la soglia alla quale viene attivato il fattore scatenante.
 - b. Per "Quantità" si intende il grado di comparsa della condizione, ad esempio: "Stress a livello 2" o "Minore deterioramento cognitivo".
 - d. "Feedback" è un testo che può essere compilato e che verrà visualizzato se si presenta il fattore scatenante.
3. Toccare "Salva".

Modificare un fattore scatenante

1. Individuare e toccare il fattore scatenante che si desidera modificare.
2. Toccare .
3. Selezionare "Modifica".
4. Compilare il modulo di inserimento.
5. Toccare "Salva".

Cancellare un fattore scatenante

1. Individuare e toccare il fattore scatenante che si desidera cancellare.
2. Toccare .
3. Toccare "Cancella".

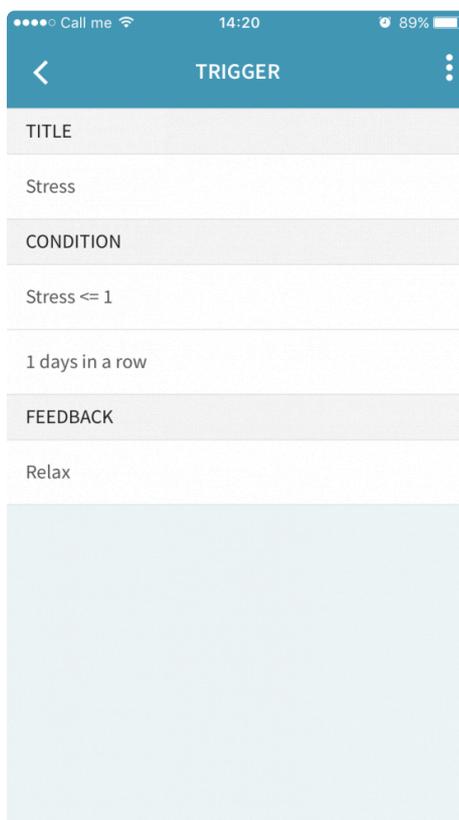

3.6. Piani di azione


Insieme al proprio medico, è possibile creare piani e promemoria utili. Questi piani di azione possono consistere in consigli, note e piani per gestire l'insorgere di comportamenti specifici, come ad esempio piani di crisi o utili suggerimenti sulla meditazione. Ogni piano di azione contiene sottosezioni chiamate elementi.

Sull'app telefonica, è possibile solo visualizzare e modificare i piani di azione esistenti. Se si desidera aggiungere e cancellare i piani di azione, è necessario farlo sul portale Web. Per ulteriori informazioni su

come aggiungere, cancellare e accedere ai piani di azione sul portale web, consultare la sezione "4.6.1. Aggiungere, modificare e cancellare i piani di azione":#add-edit-and-delete-action-plans

Modificare i piani di azione


1. Toccare il nome del piano di azione che si desidera modificare.
2. Toccare 
3. Compilare i campi di inserimento.
4. Toccare "Salva".

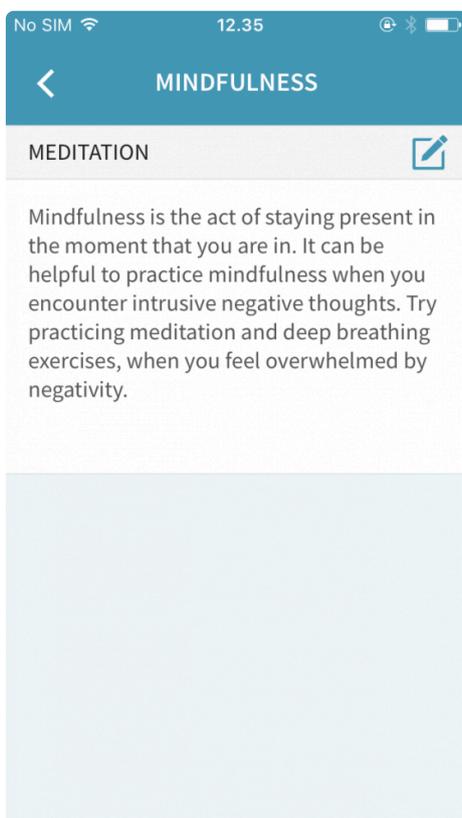

3.7. Farmaci

I farmaci offrono una panoramica delle sostanze mediche che si assumono nell'ambito del trattamento. È possibile registrare i farmaci che si assumono regolarmente, nonché quelli assunti secondo necessità (PRN).

Toccare il nome di un farmaco per visualizzarne i dettagli.

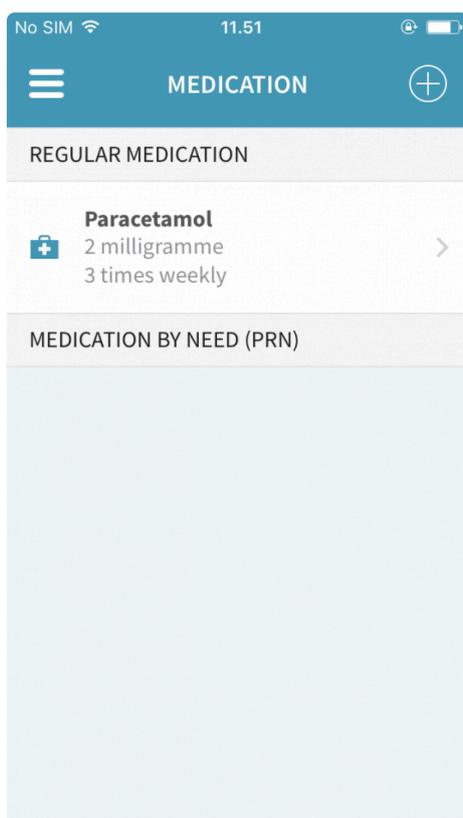

3.7.1. Aggiungere, modificare e cancellare un farmaco

Aggiungere un farmaco


1. Toccare ⊕ nell'angolo in alto a destra.
2. Compilare il modulo.
3. Toccare "Salva".

Modificare un farmaco

1. Individuare e toccare il nome del farmaco.
2. Toccare ⋮.
3. Toccare "Modifica".
4. Compilare il modulo.
5. Toccare "Salva".

Cancellare un farmaco


1. Individuare e toccare il nome del farmaco.
2. Toccare ⋮.
3. Toccare "Cancella".

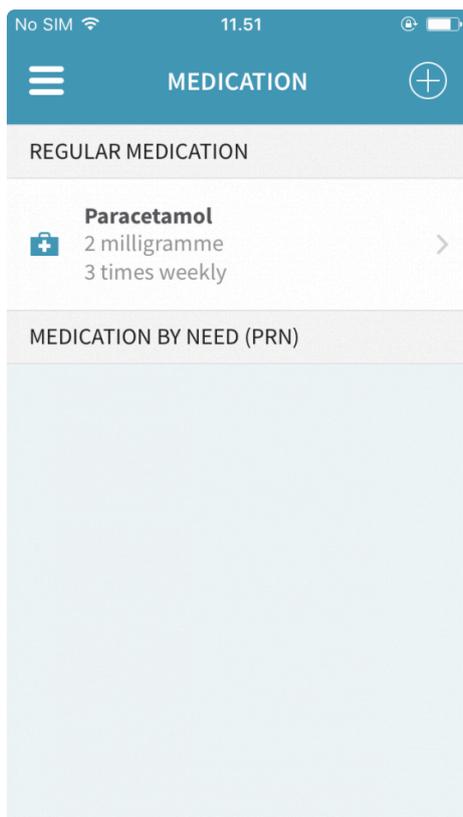

3.8. Questionari

I questionari sono sondaggi assegnati dal proprio medico in un intervallo di tempo prestabilito e mirano a fornire al paziente e al medico informazioni dettagliate sullo stato mentale e sul disturbo del paziente.

Al termine del questionario, i risultati verranno visualizzati nella sezione "Visualizzazioni". Per ulteriori informazioni sulle visualizzazioni, consultare la sezione "3.2. Visualizzazioni":#visualisations-app

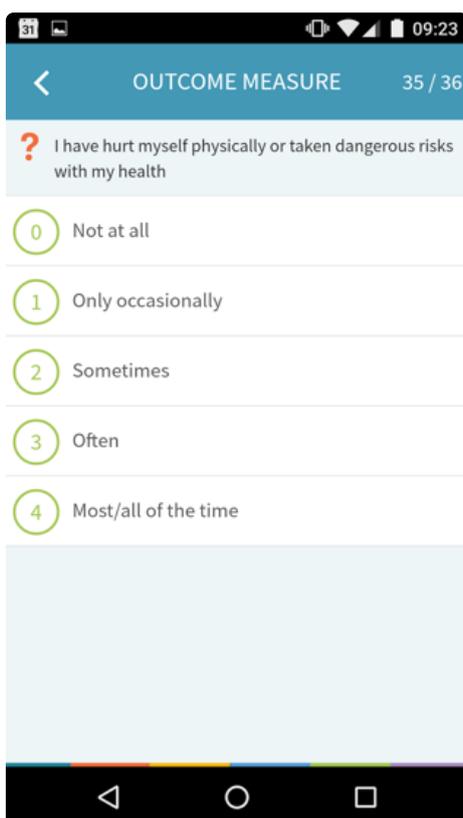


3.9. Benvenuti a Monsenso Clinic

Come utente di Monsenso Clinic, si riveste un ruolo attivo e importante nel trattamento dei propri pazienti. I pazienti riceveranno le autovalutazioni quotidiane sui loro smartphone, in relazione ad aspetti importanti e approfonditi della loro malattia che desiderano esaminare insieme al proprio medico. La soluzione Monsenso fornirà un supporto informativo e collaborativo ai pazienti in base alle loro sfide, esigenze e preferenze.

3.10. Impostazioni

È possibile apportare modifiche alla frequenza dei promemoria, impostare e modificare un codice PIN, sincronizzare il proprio dispositivo e visualizzare ulteriori informazioni sull'app nelle Impostazioni.

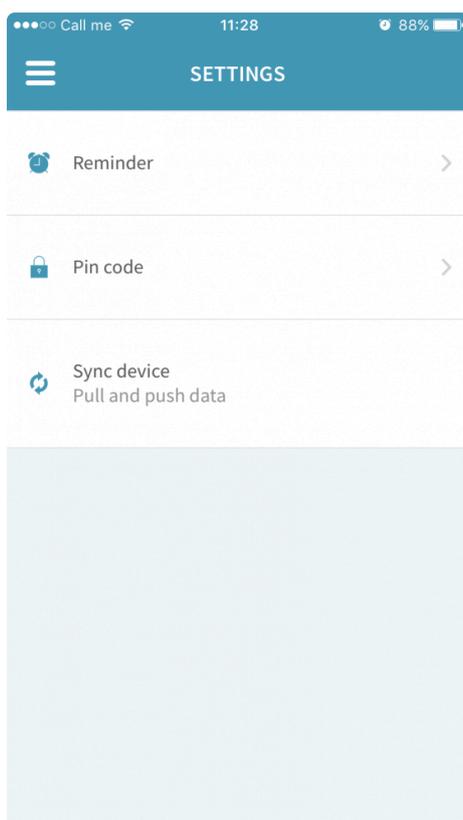

3.10.1. Promemoria

È possibile scegliere di ricevere un promemoria giornaliero per aiutare a ricordarsi di completare l'autovalutazione.

h4 Modificare l'orario del promemoria

1. Toccare "Promemoria".
2. Individuare e toccare l'opzione relativa all'orario.
3. Impostare l'orario desiderato del promemoria.
4. Toccare "Fine".


Attivare/disattivare il promemoria

1. Toccare "Promemoria".
2. Individuare l'opzione "Promemoria giornaliero".
3. Portare il cerchio su blu per **attivare** il promemoria.
4. Portare il cerchio su bianco per **disattivare** il promemoria.

Attivare/disattivare "salta il promemoria se completato"

1. Toccare "Promemoria".
2. Individuare l'opzione "Salta se completato".

3. Portare il cerchio su blu per **attivare** l'opzione. Ciò significa che se l'autovalutazione giornaliera è già stata completata, non si riceverà alcun promemoria.
4. Portare il cerchio su bianco per **disattivare** l'opzione. Ciò significa che se l'autovalutazione giornaliera è già stata completata, si riceverà ancora un promemoria.

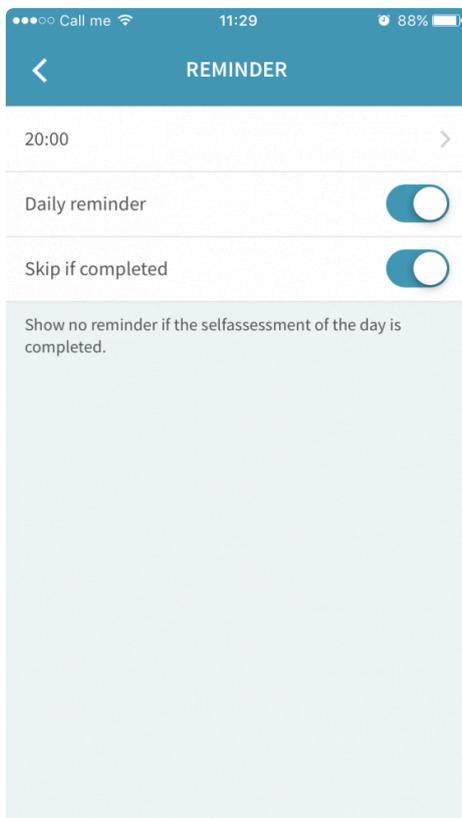

3.10.2. Codice PIN

È possibile proteggere la propria app Monsenso bloccandola con un codice PIN.

Questo significa che ogni volta che si prova ad aprire l'app, verrà chiesto di inserire questo codice.


Attivare/disattivare il codice PIN

1. Toccare "Codice PIN".
2. Individuare "Attiva il codice PIN".
3. Portare il cerchio su blu per **attivare** il codice PIN.
4. Portare il cerchio su bianco per **disattivare** il codice PIN.

Modificare il codice PIN

1. Selezionare "Modifica il codice PIN".
2. Inserire il vecchio codice PIN a 4 cifre.
3. Inserire il nuovo codice PIN a 4 cifre.

4. Il sistema ha salvato il codice PIN.

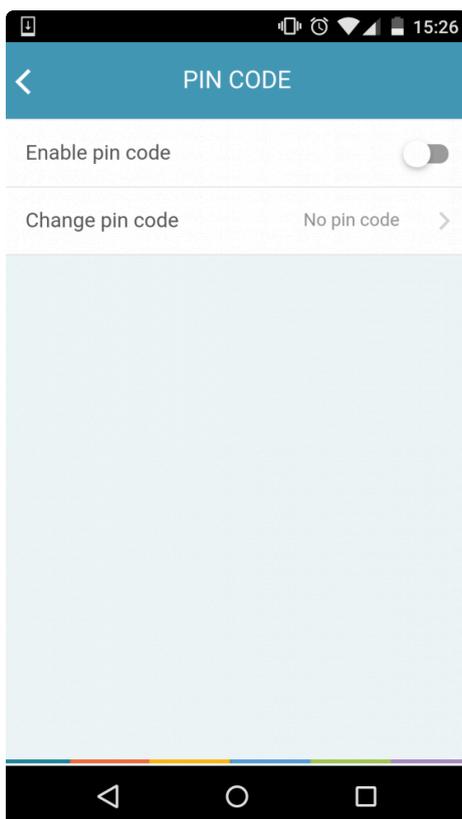

3.10.3. Sincronizzare il dispositivo

È possibile sincronizzare le modifiche effettuate sul telefono per visualizzarle sul portale Web e le modifiche dal portale Web per visualizzarle sul telefono.

Per sincronizzare manualmente il dispositivo, toccare "Sincronizza dispositivo".

Una volta completata la sincronizzazione, verrà visualizzata una notifica nella parte inferiore dello schermo.

3.11. Utilizzo del telefono

I dati relativi all'uso del telefono consentono di misurare l'entità dell'attività telefonica e includono i dati relativi al numero di app in esecuzione e alla durata di attività dello schermo del telefono.

4. Guida utente per i medici



MONSENSO
English ⚙️ 🔒



Monsenso Test Clinician 2
Monsenso Test Clinician 2



PATIENT



PATIENT OVERVIEW



SEARCH



ADMINISTRATION



Monsenso Test Patient 0

Patient overview



Overview

-  Details
-  Visualisations
-  Early warning signs
-  Triggers
-  Action plans
-  Medication
-  Journal

SELFCONTROL FROM THE LAST 90 DAYS

PRIMARY PARAMETERS

	14/3	15/3	16/3	17/3	18/3	19/3	20/3	21/3	22/3	23/3	24/3	25/3	26/3	27/3
FEAR	0	2	5	3	5	0	1	3	2	2	2	5	2	2
SAD	1	3	2	2	2	3	1	3	4	3	2	4	2	2
ANGER	0	0	1	0	0	0	0	1	2	2	3	0	3	2
JOY	1	0	1	1	2	2	2	2	2	0	2	2	2	1
SHAME	0	1	0	1	1	1	2	1	2	1	1	2	2	1

DIAGNOSIS INFORMATION

Mental health diagnosis:

Other conditions:

Latest admissions:

PATIENT INFORMATION

Pid

First name: Monsenso

Surname: Test Patient 0

Age: 25

Address:

Phone:

Email: 0000000000@monsensos.com

Marital Status:

Occupation:

Children: 0

MEDICATION

Regular Medication

Temazepam 2 units

Olanzapine 5 mcg

Medication by need (PRN)

Example 3 mcg

TREATMENT NOTE

DATA ANALYSIS

Adherence - last 60 days

Self-assessment 23 %

Medication 13 %

Average symptom scores - 14 days

Symptom score

FAMILY HISTORY

4.2. Guida utente per i medici



4.2.1. Benvenuti a Monsenso Clinic

Come utente di Monsenso Clinic, si riveste un ruolo attivo e importante nel trattamento dei propri pazienti. I pazienti riceveranno le autovalutazioni quotidiane sui loro smartphone, in relazione ad aspetti importanti e approfonditi della loro malattia che desiderano esaminare insieme al proprio medico. La soluzione Monsenso fornirà un supporto informativo e collaborativo ai pazienti in base alle loro sfide, esigenze e preferenze.

4.2.2. Benvenuti a Monsenso Clinic

Come utente di Monsenso Clinic, si riveste un ruolo attivo e importante nel trattamento dei propri pazienti. I pazienti riceveranno le autovalutazioni quotidiane sui loro smartphone, in relazione ad aspetti importanti e approfonditi della loro malattia che desiderano esaminare insieme al proprio medico. La soluzione Monsenso fornirà un supporto informativo e collaborativo ai pazienti in base alle loro sfide, esigenze e preferenze.

4.2.3. Panoramica dettagliata del paziente

La panoramica dettagliata del paziente fornisce una visione dettagliata del paziente.

Come accedere alla panoramica dettagliata

1. Andare alla Panoramica del paziente , nella parte superiore della pagina.
2. Fare clic sul pulsante "Visualizza il paziente" accanto al nome di un paziente specifico per visualizzare ulteriori informazioni in merito.

Header: MONSENSO | English | Settings | Lock

User: Monsenso Test Clinician

Navigation: PATIENT OVERVIEW | SEARCH | ADMINISTRATION

Patient overview

Cpr.no: _____ Name: **Monsenso Test Patient** View patient

	25/11	26/11	27/11	28/11	29/11	30/11	1/12	2/12	3/12	4/12	5/12	6/12	7/12	8/12	9/12	10/12	11/12	12/12	13/12	14/12	15/12
DAY SCORE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-1	0	-1	0	2	1	0	-2	-3	3	
ACTIVITY	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-2	-2	-2	3	-1	-2	1	-3	-1	0		
SLEEP	-	-	-	-	-	-	-	-	6.5	6	4	5.5	7	9.5	6	7	6.5	6.5	8		
STRESS	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	0	3	2	1	2	0	2	3	1		

Cpr.no: _____ Name: **Second Test Patient** View patient

	25/11	26/11	27/11	28/11	29/11	30/11	1/12	2/12	3/12	4/12	5/12	6/12	7/12	8/12	9/12	10/12	11/12	12/12	13/12	14/12	15/12	
DAY SCORE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ACTIVITY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SLEEP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
STRESS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sotto il nome del paziente a sinistra è presente un menu che elenca le diverse sezioni dei dettagli del paziente che è possibile visualizzare, tra cui: Panoramica, Dettagli, Visualizzazioni, Segnali di allerta, Fattori scatenanti, Piani di azione, Farmaci e Diario. Ogni sezione verrà illustrata ulteriormente nel seguito.

PRIMARY PARAMETERS

	14/3	15/3	16/3	17/3	18/3	19/3	20/3	21/3	22/3	23/3	24/3	25/3	26/3	27/3
FEAR	0	2	5	3	5	0	1	3	2	2	2	5	2	2
SAD	1	3	2	2	2	3	1	3	4	3	2	4	2	2
ANGER	0	0	1	0	0	0	0	1	2	2	3	0	3	2
JOY	1	0	1	1	2	2	2	2	2	0	2	2	2	1
SHAME	0	1	0	1	1	1	2	1	2	1	1	2	2	1

MEDICATION

Regular Medication	
Temazepam	2 units
Olanzapine	5 mcg
Medication by need (PRN)	
Example	3 mcg

PATIENT INFORMATION

Pid	
First name	Monsenso
Surname	Test Patient O
Age	25
Address	
Phone	
Email	cc.p@monsensoclinic.com
Marital Status	
Occupation	
Children	0

4.2.4. Il portale Web per i medici

Monsenso Clinic mette a disposizione un portale Web, dove è possibile consultare i dati dei pazienti e assisterli nell'utilizzo delle funzionalità del sistema. È possibile accedere al portale Web all'indirizzo <https://my.monsenso.com>.

4.2.5. Guida utente per i medici



4.2.5.1. Segnali di allerta

I segnali di allerta offrono l'opportunità di identificare i primi segni di mutamento nel benessere mentale del paziente. Sono diversi e non sempre semplici da identificare da soli, motivo per cui si consiglia di aiutare i pazienti a eseguire questa operazione. Una volta configurati e attivati, i segnali di allerta verranno visualizzati nell'autovalutazione del paziente.

The screenshot shows the 'Early Warning Signs' section of the patient portal. The interface is clean and modern, with a teal header and a white main content area. The 'Early warning signs' tab is highlighted in the sidebar. The main content area displays two signs: 'Panic attack' and 'Rage'. Each sign has a 'Symptom' and 'Feedback' section. The 'Panic attack' sign has symptoms like 'Panicking in public. Cannot focus. Sweaty palms. Discomfort and heart pounding.' and feedback 'Take a long walk. Make sure calendar is not too busy.' The 'Rage' sign has symptoms like 'Aggressive behaviour' and feedback 'Take a walk. Practice forgiveness and breathing patterns.'

4.2.5.2. Configure self-assessment notifications

1. Choose 'Notifications' at the bottom-right of the screen.
2. Press the checkbox to enable a reminder.
3. Select a time for the reminder by pressing the time picker.

4.3. Il portale Web per i medici

Monsenso Clinic mette a disposizione un portale Web, dove è possibile consultare i dati dei pazienti e


assisterli nell'utilizzo delle funzionalità del sistema. È possibile accedere al portale Web all'indirizzo <https://my.monsenso.com>.

4.3.1. Panoramica dettagliata del paziente

La panoramica dettagliata del paziente fornisce una visione dettagliata del paziente.

Come accedere alla panoramica dettagliata

1. Andare alla Panoramica del paziente , nella parte superiore della pagina.
2. Fare clic sul pulsante "Visualizza il paziente" accanto al nome di un paziente specifico per visualizzare ulteriori informazioni in merito.

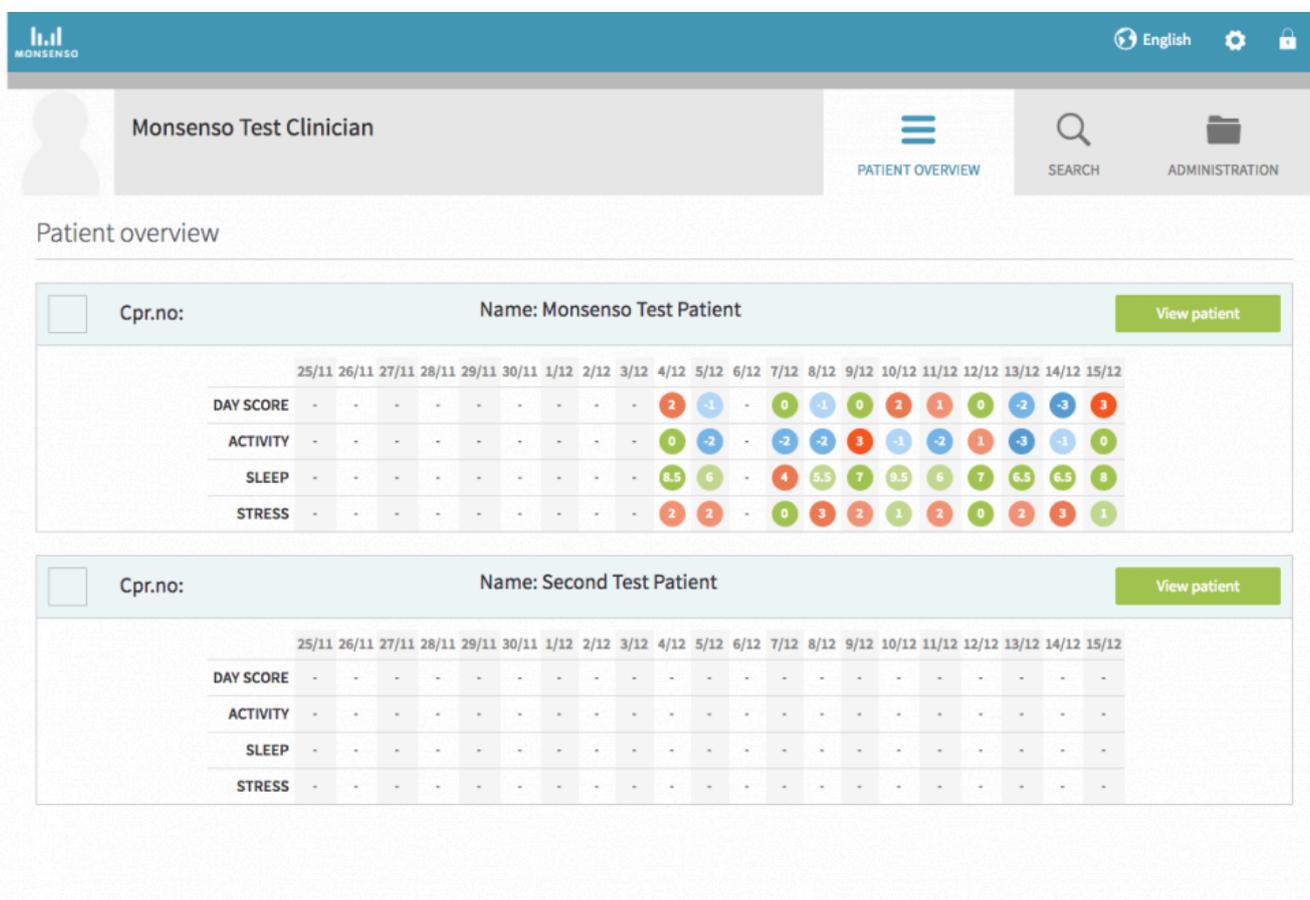

Patient overview

	25/11	26/11	27/11	28/11	29/11	30/11	1/12	2/12	3/12	4/12	5/12	6/12	7/12	8/12	9/12	10/12	11/12	12/12	13/12	14/12	15/12
DAY SCORE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-1	-	0	-1	0	2	1	0	-2	-3	3
ACTIVITY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-2	-	-2	-2	3	-1	-2	1	-3	-1	0
SLEEP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.5	6	-	4	5.5	7	9.5	6	7	6.5	6.5	8
STRESS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	0	3	2	1	2	0	2	3	1

	25/11	26/11	27/11	28/11	29/11	30/11	1/12	2/12	3/12	4/12	5/12	6/12	7/12	8/12	9/12	10/12	11/12	12/12	13/12	14/12	15/12
DAY SCORE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ACTIVITY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SLEEP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
STRESS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sotto il nome del paziente a sinistra è presente un menu che elenca le diverse sezioni dei dettagli del paziente che è possibile visualizzare, tra cui: Panoramica, Dettagli, Visualizzazioni, Segnali di allerta, Fattori scatenanti, Piani di azione, Farmaci e Diario. Ogni sezione verrà illustrata ulteriormente nel seguito.

Cancellare il piano di trattamento con il farmaco

1. Individuare il piano di trattamento con il farmaco che si desidera cancellare.
2. Cancellare l'intero contenuto del campo di inserimento.
3. Fare clic su "Salva".

4.4.1. Guida utente per i medici



4.5. Explore your data

Under 'Explore', you have the option to visualise the data from your self-assessment, or other data, if applicable.

To Explore a particular data point:

1. Press 'Select data'.
2. Select the data point which you would like to explore.
3. Set the preferred time span by tapping it.
4. Tap on a single point on the graph to display an info-box with additional information about that particular data point.

Note that you can explore multiple disparate data points at once.

4.6. Psychoeducation

The psychoeducation module allows you to watch videos or read articles related to your disorder or to other areas of mental health.

5. My Monsenso: portale Web

È possibile visualizzare la maggior parte delle funzioni dell'app sul portale Web, nonché visualizzare i dati per tutte le autovalutazioni effettuate e creare nuovi piani di azione.

È possibile accedere al portale Web all'indirizzo <https://my.monsenso.com>.

5.1. Accesso e uscita


È possibile accedere al portale Web con la stessa combinazione di indirizzo e-mail e password utilizzata per accedere all'app telefonica.

Accesso

Digitare l'e-mail e la password scelta al momento della registrazione.

Uscita

Fare clic su  nell'angolo in alto a destra dello schermo e confermare che si desidera uscire.

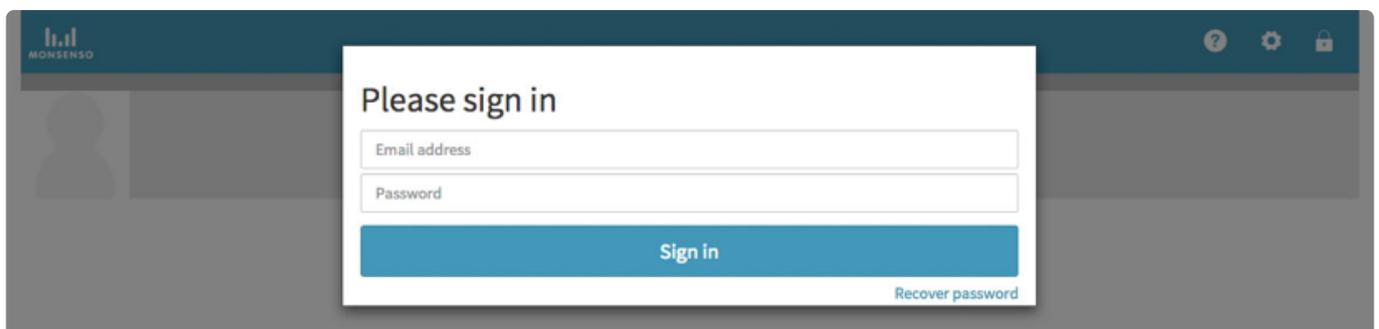

Recuperare la password

1. Fare clic su "Recupera la password".
2. Si riceverà un'e-mail contenente le istruzioni su come reimpostare la password.

5.2. Guida utente per i medici



5.3. Il portale Web per i medici


Monsenso Clinic mette a disposizione un portale Web, dove è possibile consultare i dati dei pazienti e assisterli nell'utilizzo delle funzionalità del sistema. È possibile accedere al portale Web all'indirizzo <https://my.monsenso.com>.

5.4. Panoramica

Una volta effettuato l'accesso al portale Web, si aprirà la pagina Panoramica.

Per tornare a questa panoramica, fare clic sull'icona "Paziente"  nell'angolo in alto a destra.

Il menu di navigazione si trova a sinistra, sotto il nome del paziente, e nelle sezioni seguenti verranno discusse tutte le funzioni elencate nel menu.

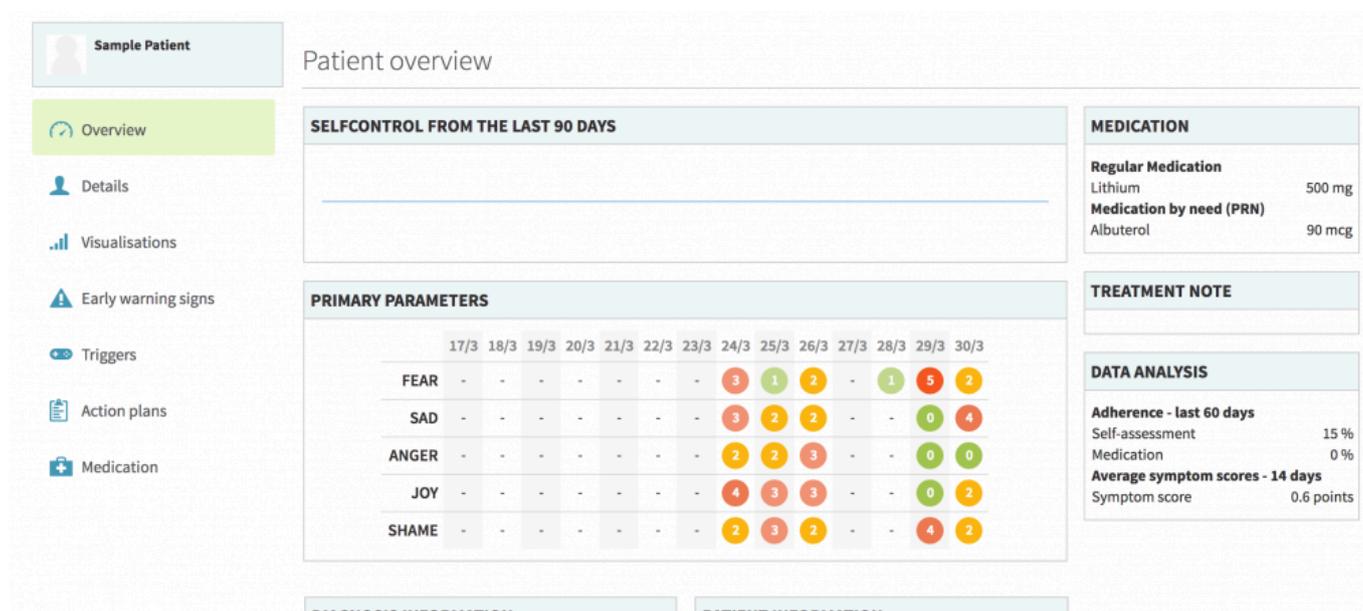

Sample Patient Patient overview

SELFCONTROL FROM THE LAST 90 DAYS

PRIMARY PARAMETERS

	17/3	18/3	19/3	20/3	21/3	22/3	23/3	24/3	25/3	26/3	27/3	28/3	29/3	30/3
FEAR	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	-	1	5	2
SAD	-	-	-	-	-	-	-	3	2	2	-	-	0	4
ANGER	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	-	-	0	0
JOY	-	-	-	-	-	-	-	4	3	3	-	-	0	2
SHAME	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	-	-	4	2

MEDICATION

Regular Medication

Lithium 500 mg

Medication by need (PRN)

Albuterol 90 mcg

TREATMENT NOTE

DATA ANALYSIS

Adherence - last 60 days

Self-assessment 15 %

Medication 0 %

Average symptom scores - 14 days

Symptom score 0.6 points

DIAGNOSIS INFORMATION **PATIENT INFORMATION**

5.5. Dettagli

Nella sezione Dettagli, è possibile visualizzare e modificare le proprie informazioni, la diagnosi, la storia familiare e le note sul trattamento.

Demo Patient

- Overview
- Details**
- Visualisations
- Warning signs
- Triggers
- Action plans
- Medication

Patient details

PATIENT INFORMATION



PID: [blank]
 First name: Demo
 Surname: Patient
 Birthyear: 1985

Marital Status: [blank]
 Occupation: Secretary
 Children: 1
 Network: 4
 Primary: [blank]
 Phone: [blank]

Address: Rued Langgaards Vej 7
 2300 Copenhagen

Phone 1: [blank]
 Phone 2: [blank]
 Email: demo.patient@monsensio.com

Relative: [blank]
 Phone: [blank]

DIAGNOSIS INFORMATION

Mental health diagnosis: - Diagnosis 1 age 20 - Diagnosis 2 age 15 - Diagnosis 3 age 14	Other conditions: - Diagnosis 4 age 17	Latest admissions: 5 Jan 2016 2 days Hospital 8 May 2016 5 days Copenhagen
--	---	--

5.5.1. Modificare i dettagli

1. Fare clic su  nell'angolo in alto a destra.
2. Al termine delle modifiche, fare clic su "Salva".

5.6. Visualizzazioni

Il portale Web è diverso dall'app telefonica, in quanto può mostrare le visualizzazioni di ogni autovalutazione effettuata.

MONSENSIO
English
⚙️
🔒

Demo Patient
Monsenso

PATIENT

Demo Patient


- Overview
- Details
- Visualisations**
- Warning signs
- Triggers
- Action plans
- Medication

Visualisations

From date: 10 June 2017 To: 13 June 2017

General **Notes**

Mood

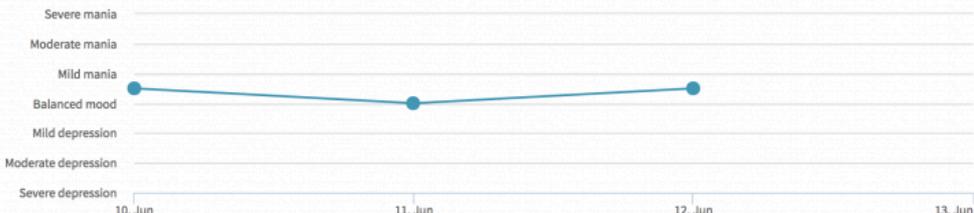

Date	Mood Level
10. Jun	Mild mania
11. Jun	Between Mild mania and Balanced mood
12. Jun	Mild mania

Aprire diverse visualizzazioni


1. Individuare le schede sotto l'intestazione "Visualizzazioni".
2. Fare clic sulla scheda della categoria che si desidera visualizzare.

Modificare l'intervallo di visualizzazione

1. Selezionare se si desidera modificare la data "Dal:" o "Al:".
2. Fare clic su  a destra della data.
3. Fare clic su < per tornare indietro di un mese. Fare clic su > per avanzare di un mese.

Visualizzare i dettagli di un punto della visualizzazione

1. Posizionare il cursore sul punto specifico del grafico.
2. Viene visualizzata una finestra a comparsa con i dettagli: il valore numerico specifico del punto e la data completa.

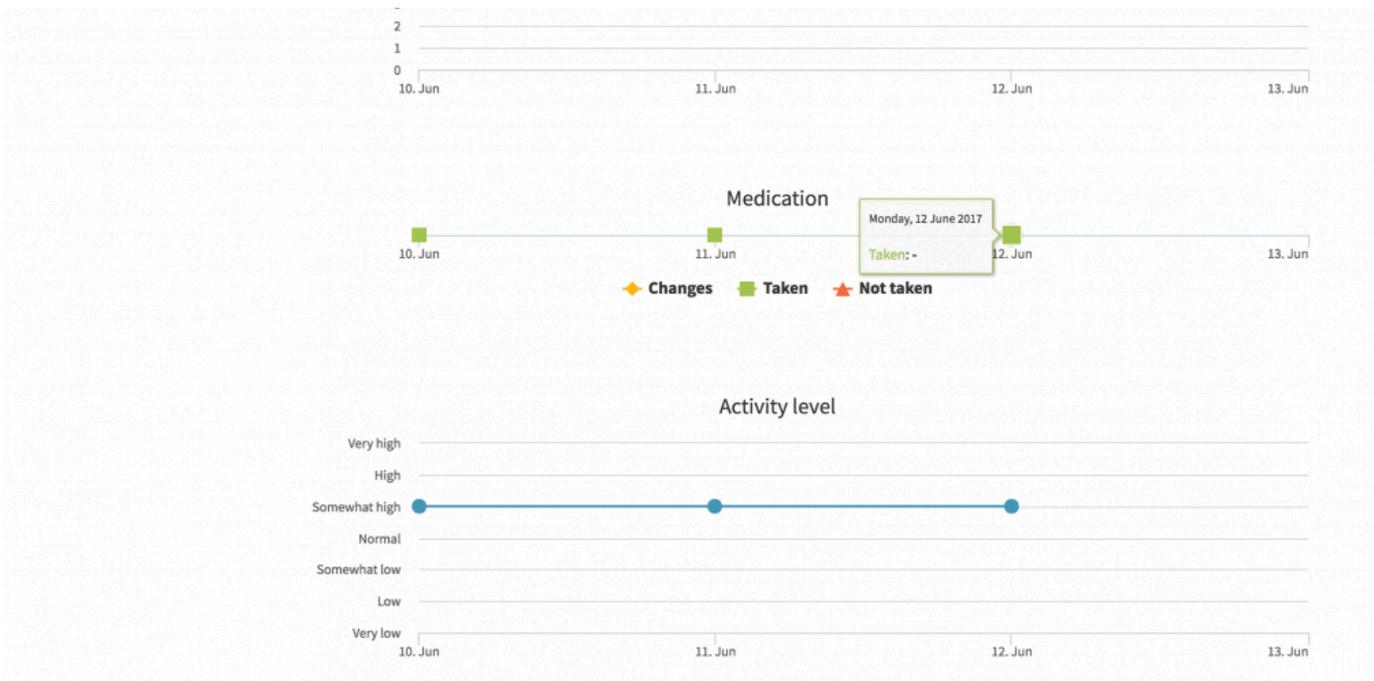

5.7. Segnali di allerta

Una volta configurati e attivati, i segnali di allerta verranno visualizzati nell'autovalutazione. Per attivare i segnali di allerta, consultare la sezione "3.1.6.2. Attivazione/disattivazione dei segnali di allerta":#warning-signs-on-off.

Per una descrizione dei segnali di allerta, consultare la sezione "3.3. Segnali di allerta":#warning-signs.

Demo Patient

Warning Signs

- Overview
- Details
- Visualisations
- Warning signs**
- Triggers
- Action plans
- Medication

Insomnia
Symptom
Unable to fall asleep due to restless thoughts and anxiety
Feedback
Schedule an appointment with therapist right away

5.7.1. Aggiungere, modificare e cancellare i segnali di allerta

Aggiungere un segnale di allerta

1. Fare clic su ⊕ nell'angolo in alto a destra.
2. Compilare i campi di inserimento. "Feedback" si riferisce al testo personale che viene visualizzato quando si presenta questo segnale di allerta.
3. Fare clic su "Salva".

Modificare un segnale di allerta

1. Individuare il segnale di allerta che si desidera modificare.
2. Fare clic su ⋮.
3. Selezionare "Modifica".
4. Compilare i campi di inserimento.
5. Fare clic su "Salva".

Cancellare un segnale di allerta

1. Individuare il segnale di allerta che si desidera cancellare.
2. Fare clic su ⋮.
3. Selezionare "Cancella".

5.8. Fattori scatenanti

Per una descrizione dei fattori scatenanti, consultare la sezione "3.4. Fattori scatenanti":#triggers-app.

5.8.1. Aggiungere, modificare e cancellare i fattori scatenanti

Aggiungere un fattore scatenante

1. Fare clic su ⊕ nell'angolo in alto a destra.
2. Compilare i campi di inserimento.
 - a. "Condizione" è il parametro che si sta selezionando come fattore scatenante. Se il parametro non compare nell'elenco, è possibile aggiungerlo come parametro personalizzato; per informazioni su come procedere, consultare la sezione "3.1.6.3. Aggiungere un parametro personale":#adding-a-personal-parameter.
 - b. Per "Operando" si intende il grado di comparsa della condizione, ad esempio: "Stress a livello 2" o "Minore deterioramento cognitivo".
 - c. "Feedback" è un testo che può essere compilato e che verrà visualizzato se si presenta il fattore scatenante.
3. Fare clic su "Salva".

Modificare un fattore scatenante

1. Individuare il fattore scatenante che si desidera modificare.
2. Fare clic su ⋮.
3. Selezionare "Modifica".
4. Compilare il modulo di inserimento.
5. Fare clic su "Salva".

Cancellare un fattore scatenante

1. Individuare il fattore scatenante che si desidera cancellare.
2. Fare clic su ⋮.
3. Fare clic su "Cancella".

The screenshot shows the patient portal interface for 'Demo Patient' (Monsenso). The top navigation bar includes the Monsenso logo, language settings (English), and user icons. The patient's name and role (PATIENT) are displayed in the header. A sidebar on the left contains navigation options: Overview, Details, Visualisations, Warning signs, Triggers (highlighted), Action plans, and Medication. The main content area is titled 'Triggers' and features a 'Stress Breakdown' card with a menu icon. The card displays 'Stress = 2 for 2 days.' and a 'Feedback' section with the text: 'Remember to find a way to relax, and to call your therapist.'

5.9. Piani di azione

Sul portale Web, è possibile aggiungere e cancellare i piani di azione.

Per una descrizione dei piani di azione, consultare la sezione "3.5. Piani di azione":[#action-plans-app](#)

The screenshot shows the patient portal interface for 'Demo Patient' (Monsenso). The top navigation bar includes the Monsenso logo, language settings (English), and user icons. The patient's name and role (PATIENT) are displayed in the header. A sidebar on the left contains navigation options: Overview, Details, Visualisations, Warning signs, Triggers, Action plans (highlighted), and Medication. The main content area is titled 'Action plans' and features two cards: 'Mania' and 'Depression', each with a play button icon and a menu icon.

5.9.1. Aggiungere, modificare e cancellare i piani di azione

Aggiungere i piani di azione


1. Fare clic su ⊕ nell'angolo in alto a destra.
2. Aggiungere un titolo al piano di azione. Ogni piano di azione contiene sottosezioni chiamate elementi.
3. Fare clic su "+Aggiungi elemento". Questi elementi svolgono la funzione di sottosezioni al piano di azione.
> Per rimuovere un elemento in un piano di azione, fare clic su "-Rimuovi l'elemento".
4. Compilare il titolo del piano di azione e il modulo di inserimento.
5. Fare clic su "Salva".

Modificare i piani di azione

1. Individuare il nome del piano di azione che si desidera modificare.
2. Fare clic su ⋮.
3. Fare clic su "Modifica".
4. Compilare il modulo di inserimento.
5. Fare clic su "Salva".

Cancellare i piani di azione

1. Individuare il nome del piano di azione che si desidera cancellare.
2. Fare clic su ⋮.
3. Fare clic su "Cancella".

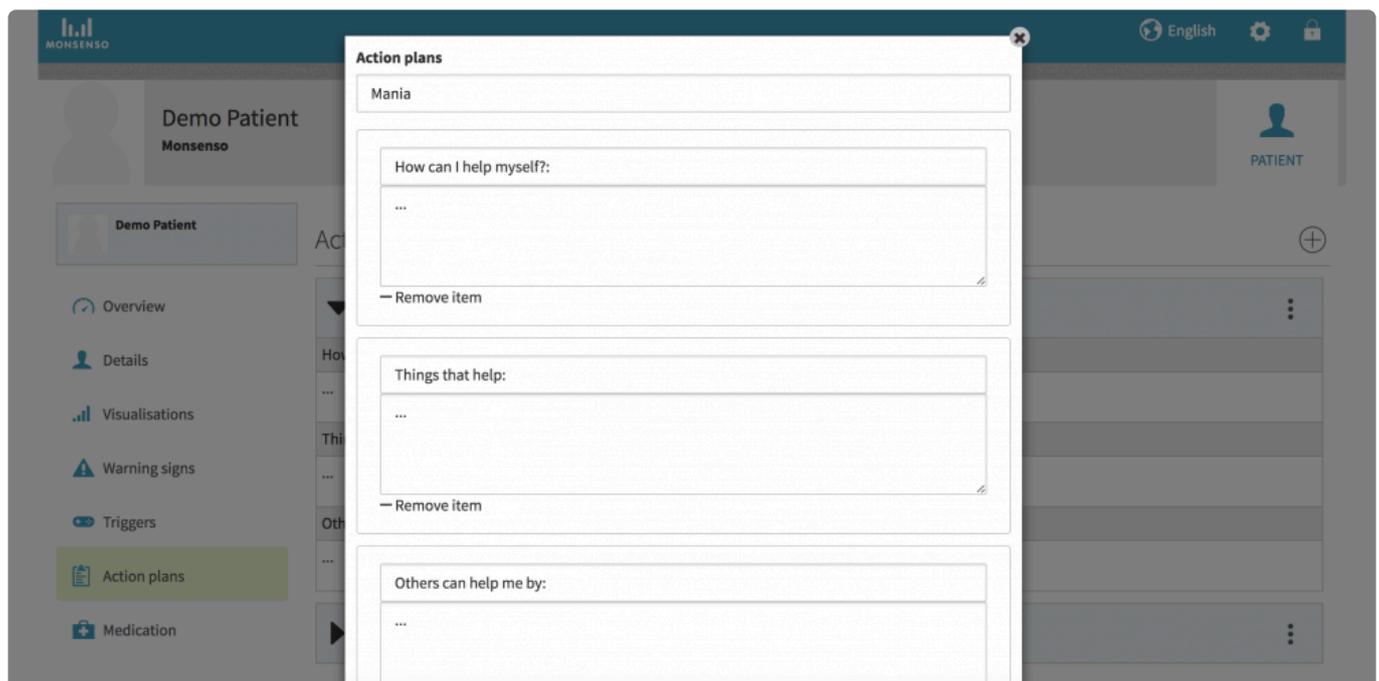

5.10. Farmaci

Per una descrizione della sezione dei farmaci, consultare la sezione "3.6. Farmaci":#medication-app

5.10.1. Aggiungere, modificare e cancellare un farmaco

Aggiungere un farmaco

1. Fare clic su ⊕ nell'angolo in alto a destra.
2. Compilare il modulo di inserimento.
3. Fare clic su "Salva".

Modificare un farmaco

1. Individuare il nome del farmaco.
2. Fare clic su ⋮.
3. Fare clic su "Modifica".
4. Compilare il modulo di inserimento.
5. Fare clic su "Salva".

Cancellare un farmaco

1. Individuare il nome del farmaco.
2. Fare clic su ⋮.

3. Fare clic su "Cancella".

5.10.2. Piano di trattamento con il farmaco

Modificare il piano di trattamento con il farmaco

1. Fare clic su .
2. Compilare il modulo.
3. Fare clic su "Salva".

Cancellare il piano di trattamento con il farmaco

1. Fare clic su .
2. Cancellare il campo di inserimento.
3. Fare clic su "Salva".

5.10.3. Esperienze con il farmaco

La sezione sulle esperienze con il farmaco contiene una descrizione delle esperienze precedenti e presenti relative al farmaco.

Modificare le esperienze con il farmaco

1. Fare clic su .
2. Compilare il modulo di inserimento.
3. Fare clic su "Salva".

Cancellare le esperienze con il farmaco

1. Individuare l'esperienza con il farmaco che si desidera cancellare.
2. Cancellare il campo di inserimento.
3. Fare clic su "Salva".

5.11. Guida utente per i medici



5.12. Benvenuti a Monsenso Clinic

Come utente di Monsenso Clinic, si riveste un ruolo attivo e importante nel trattamento dei propri pazienti. I pazienti riceveranno le autovalutazioni quotidiane sui loro smartphone, in relazione ad aspetti importanti e approfonditi della loro malattia che desiderano esaminare insieme al proprio medico. La soluzione Monsenso fornirà un supporto informativo e collaborativo ai pazienti in base alle loro sfide, esigenze e preferenze.

5.13. Il portale Web per i medici

Monsenso Clinic mette a disposizione un portale Web, dove è possibile consultare i dati dei pazienti e assisterli nell'utilizzo delle funzionalità del sistema. È possibile accedere al portale Web all'indirizzo <https://my.monsenso.com>.

5.13.1. Guida utente per i medici



5.14. Amministrazione


Nella sezione Amministrazione, è possibile aggiungere nuovi pazienti e medici, modificare le associazioni e visualizzare le informazioni di contatto.

Per aggiungere un paziente o un medico nel sistema, fare clic su "Aggiungi un nuovo paziente" o "Aggiungi un nuovo medico". Un paziente ha la possibilità di scaricare e installare l'app sul proprio smartphone, una volta che è stato aggiunto nel sistema.

Notare che **non è possibile riutilizzare gli indirizzi e-mail nel sistema**.

Le informazioni di un paziente **non** compariranno nella Panoramica del paziente del medico, se non sono associate a tale medico.

Per le istruzioni su come associarsi a un paziente, consultare la sezione "3.5.2. Medici":#clinicians.

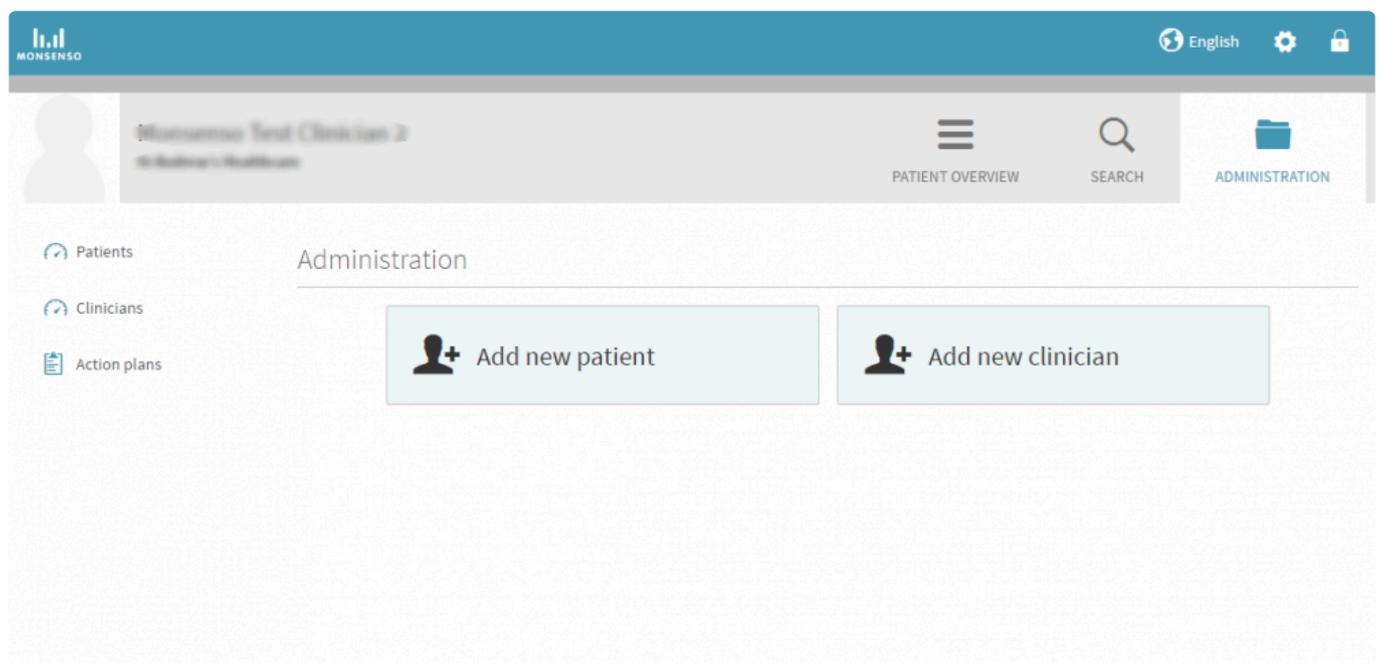

5.14.1. Pazienti

L'opzione "Pazienti" nella sezione Amministrazione consente di visualizzare una directory di tutti i pazienti all'interno della clinica. Notare che non è possibile modificare un paziente a cui non si è associati.

Aggiungere un paziente

1. Fare clic su ⊕ nell'angolo in alto a destra.
2. Compilare il modulo.

3. Fare clic su "Salva".
4. A questo punto, il paziente riceverà un link di attivazione nella sua e-mail e facendo clic sul link gli verrà chiesto di accettare le condizioni d'uso e di selezionare una password.
5. Una volta accettate le condizioni d'uso e selezionato una password, viene visualizzata una notifica di conferma verde e l'account del paziente è pronto per l'uso.

Rendere il paziente inattivo


È possibile rendere inattivi i pazienti quando vengono aggiunti al sistema. I pazienti inattivi non saranno in grado di utilizzare le funzioni della soluzione Monsenso. Per rendere un paziente inattivo, spuntare la casella "Gruppo di controllo" nella parte inferiore del modulo quando si aggiunge un nuovo paziente.

Modificare i dettagli del paziente

1. Individuare il paziente che si desidera modificare.
2. Fare clic su  a destra.
3. Compilare il modulo.
4. Fare clic su "Salva".

Cancellare un paziente

1. Individuare il paziente che si desidera cancellare.
2. Fare clic su  a destra.
3. Con la conferma della cancellazione, il paziente viene cancellato definitivamente dal sistema.

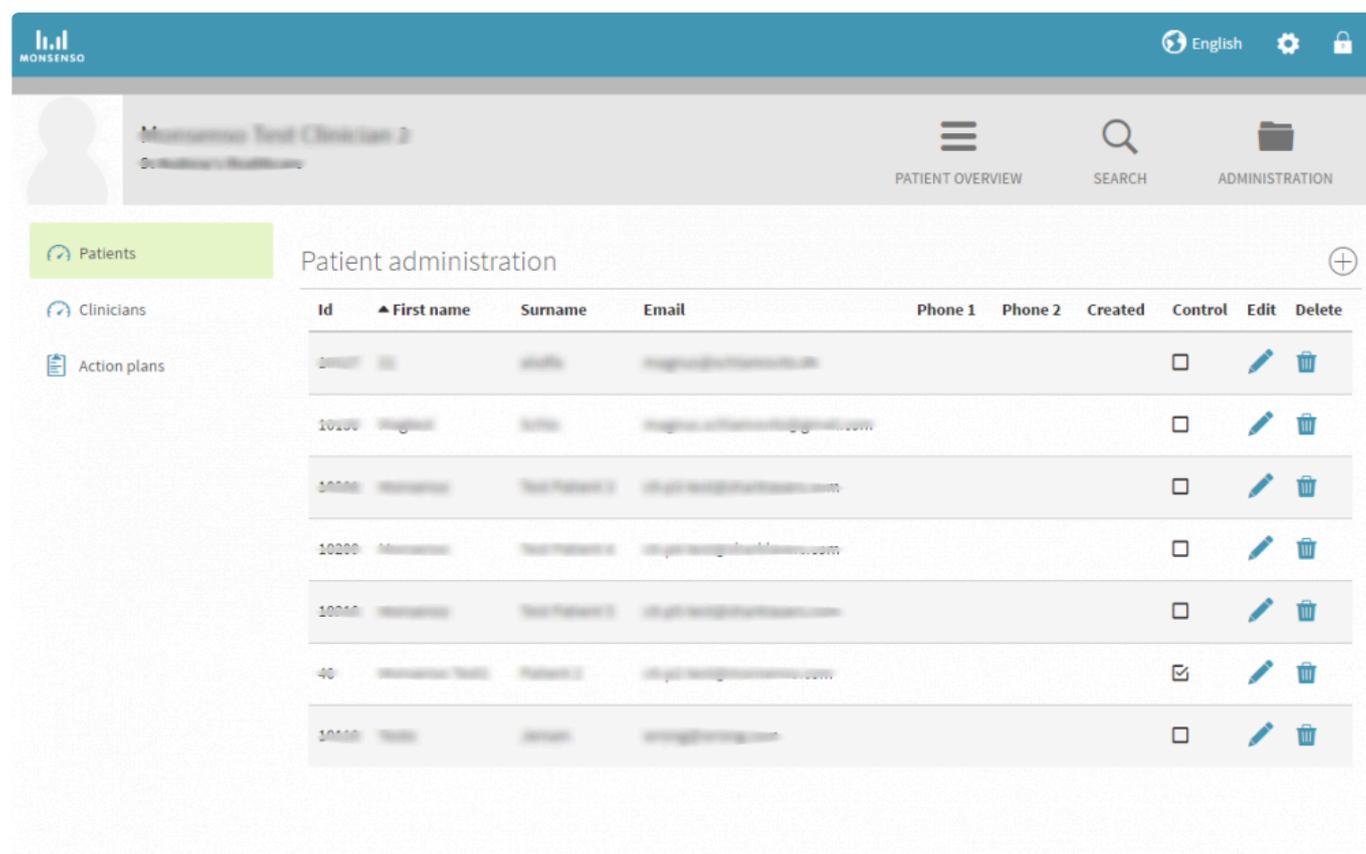

Patients

Clinicians

Action plans

Patient administration

Id	▲ First name	Surname	Email	Phone 1	Phone 2	Created	Control	Edit	Delete
20007	Luca	Costa	luca@monsensoclinica.it				<input type="checkbox"/>		
10200	Luca	Costa	luca@monsensoclinica.it				<input type="checkbox"/>		
10000	Monsenso	Test Patient 1	test@monsensoclinica.it				<input type="checkbox"/>		
10200	Monsenso	Test Patient 2	test@monsensoclinica.it				<input type="checkbox"/>		
10000	Monsenso	Test Patient 3	test@monsensoclinica.it				<input type="checkbox"/>		
40	Monsenso Test	Test 1	test@monsensoclinica.it				<input checked="" type="checkbox"/>		
10000	Test	Test	test@monsensoclinica.it				<input type="checkbox"/>		

5.14.2. Medici

L'opzione "Medici" nella sezione Amministrazione consente di visualizzare una directory di tutti i medici all'interno della clinica.

Aggiungere un medico


1. Fare clic su nell'angolo in alto a destra.
2. Compilare il modulo.
3. Fare clic su "Salva".
4. A questo punto, il medico riceverà un link di attivazione nella sua e-mail e facendo clic sul link gli verrà chiesto di accettare le condizioni d'uso e di selezionare una password.
5. Una volta accettate le condizioni d'uso e selezionato una password, viene visualizzata una notifica di conferma verde e l'account del medico è pronto per l'uso.

Modificare i dettagli del medico

1. Individuare il medico che si desidera modificare
2. Fare clic su a destra.
3. Compilare il modulo.
4. Fare clic su "Salva".

Cancellare un medico

1. Individuare il medico che si desidera cancellare.
2. Fare clic su  a destra.

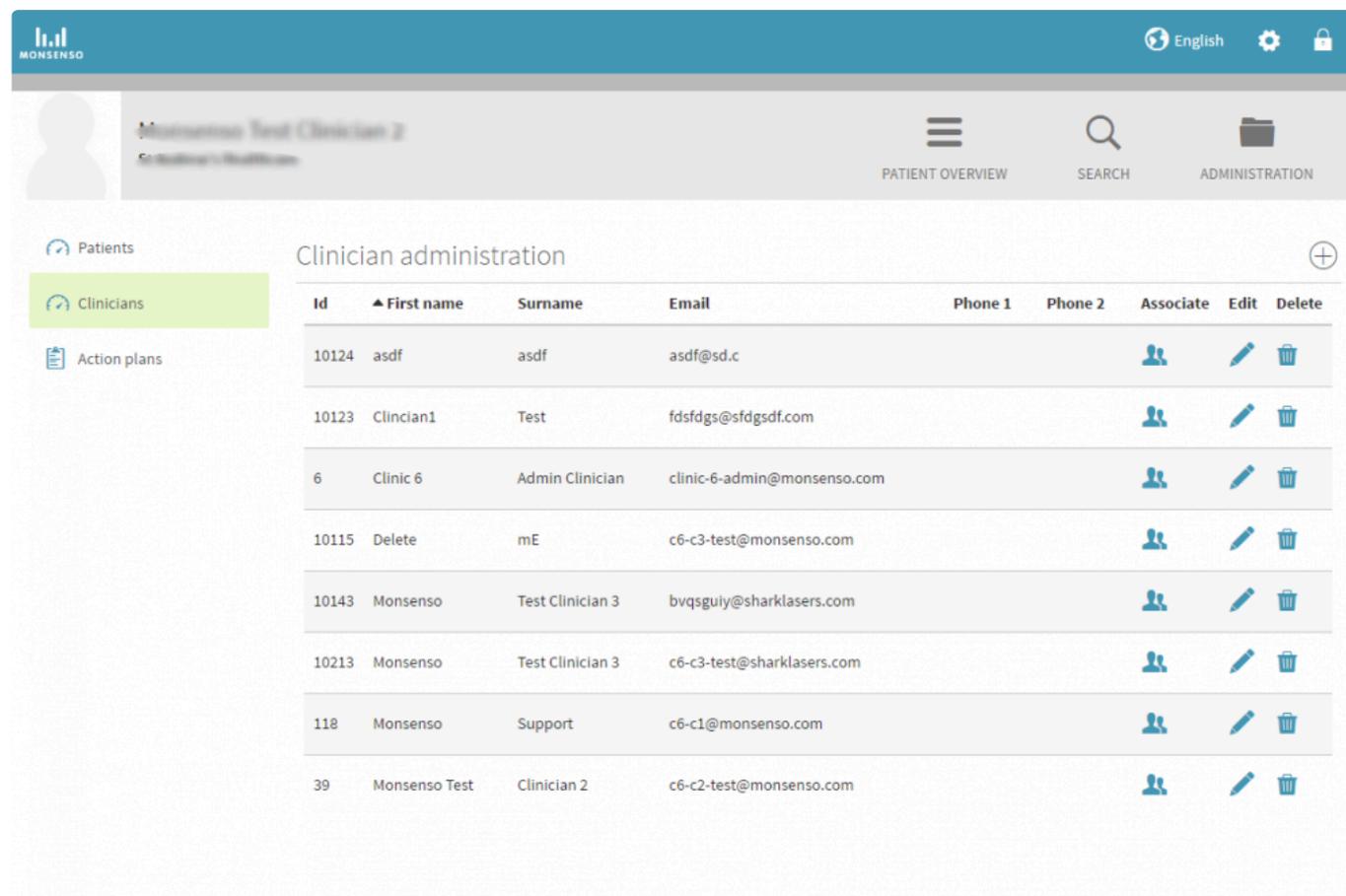

The screenshot displays the 'Clinician administration' page in the Monsenso system. The page header includes the Monsenso logo, language settings (English), and navigation icons for Patient Overview, Search, and Administration. A sidebar on the left shows navigation options for Patients, Clinicians (highlighted), and Action plans. The main content area features a table of clinicians with the following data:

Id	First name	Surname	Email	Phone 1	Phone 2	Associate	Edit	Delete
10124	asdf	asdf	asdf@sd.c					
10123	Clinician1	Test	fdsgfdgs@fdsgsd.com					
6	Clinic 6	Admin Clinician	clinic-6-admin@monsensio.com					
10115	Delete	mE	c6-c3-test@monsensio.com					
10143	Monsenso	Test Clinician 3	bvqsguy@sharklasers.com					
10213	Monsenso	Test Clinician 3	c6-c3-test@sharklasers.com					
118	Monsenso	Support	c6-c1@monsensio.com					
39	Monsenso Test	Clinician 2	c6-c2-test@monsensio.com					

Associarsi e dissociarsi dai pazienti

Andare al menu Associazioni

1. Individuare il medico che si desidera associare a un paziente.
2. Fare clic sulle due sagome  a destra.

Associarsi

1. Fare clic sulla barra di ricerca per cercare il paziente a cui si desidera associarsi.
2. Fare clic sul suo nome.
3. Fare clic su "Salva".


Dissociarsi

Per dissociarsi da un paziente associato, fare clic su  a destra del nome del paziente nell'elenco dei pazienti associati.

5.14.3. Modelli dei piani di azione

I modelli dei piani di azione possono essere costituiti da suggerimenti, note e piani per l'insorgenza di comportamenti specifici.

Una volta creato, il modello verrà distribuito a tutti i pazienti che sono stati creati successivamente. Se si desidera distribuirlo a un paziente preesistente o aggiungere un modello specifico per un solo paziente, consultare la sezione "3.4.6. Piani di azione":#action-plans.

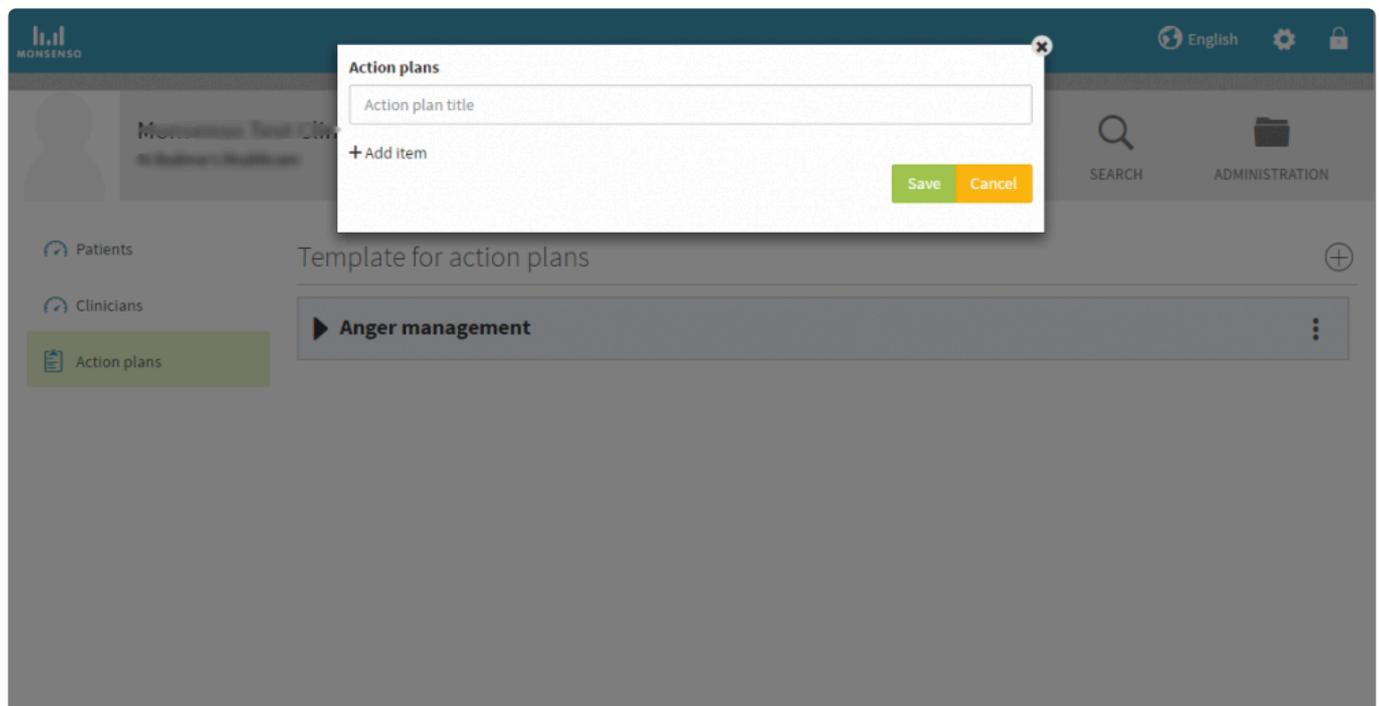

5.14.3.1. Aggiungere, modificare e cancellare i modelli dei piani di azione

Consultare la sezione "3.4.6.1. Aggiungere, modificare e cancellare i piani di azione":#add-edit-and-delete-action-plans.

5.15. Valutazione del medico

È possibile aggiungere una valutazione sulla qualità delle sessioni con il paziente.

Questa valutazione si basa su un questionario in cui è possibile valutare il comportamento del paziente.

Aggiungere la valutazione di un medico

1. Andare alla panoramica dettagliata del paziente.
2. Fare clic su ⊕ nell'angolo in alto a destra della schermata Panoramica.
3. Si apre una finestra in cui è possibile compilare un questionario.
4. Fare clic su "Salva".
5. I risultati dei questionari verranno visualizzati nella sezione "Visualizzazioni" del portale Web. Per sapere come accedere a queste visualizzazioni, consultare la sezione "3.4.3. Visualizzazioni":#visualisations.

6. Sicurezza

Monsenso Clinic possiede le necessarie misure di sicurezza tecniche e organizzative per impedire che le informazioni personali vengano accidentalmente o illegalmente distrutte, smarrite o deteriorate. Inoltre, la soluzione applica le funzioni di sicurezza necessarie, assicurando che le informazioni riservate non cadano nelle mani di persone non autorizzate e non siano utilizzate in modo improprio o in generale trattate in violazione della normativa.

Monsenso Clinic segue le linee guida di sicurezza dell'Agenzia danese per la protezione dei dati (Datatilsynet) sulle misure di protezione dei dati personali.

7. Contatti

In caso di domande o problemi non descritti in questa guida per l'utente, contattare il proprio medico.

		Monsenso ApS, Langelinie Allé 47, DK-2100 Copenhagen, Denmark Phone: +45 3025 1580, E-mail: info@monsensio.com , Web: www.monsensio.com
---	---	--